

품질 보증서

- 제품명 : 고령자용 조절형 지팡이(소프트그립 야광지팡이)
- 모델명 : RPM75137P, RPM75120P, RPM75129P, RPM75132P
RPM73070, RPM70005P, RPM76206, RPM76207
RPM76208, RPM76209

- 구입일자 : 20 년 월 일
- 고객성명 :
- 구입처 :
- 전화번호 :
- 아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품의 이상 발생 시 보증기간(구입 후 1년)동안 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 A/S센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
3. 다음의 경우에는 무상 A/S에서 제외됩니다.
 - * 사용자의 취급부주의로 인한 고장
 - * 천재지변(화재, 염해, 수해, 기타)으로 인한 고장
 - * 임의로 개조, 변경하여 발생하는 고장
 - * 지팡이 고무 마모, 손목끈, 소모품, 각 부분의 노화로 인한 고장 및 파손

■ 서비스를 요청하실 때에는

1. 구입하신 판매점이나 본사로 연락하시기 바라며, 사용 전 사용설명서를 충분히 숙지하시길 바랍니다.
2. 직접 수리하시면 더 많은 고장의 원인이 됩니다.

- 수리, 취급 등의 상담은 먼저 구입하신 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.

품질경영 및 공산품 안전관리법에 의한 품질표시

to your health
Clearview Healthcare Products, Inc.

품명 : 고령자용 조절형 지팡이

제조년월일 : 별도표기

제조자명 : PROFIT COUNTRY ENTERPRISES LTD.

수입자명 : (주)클리어뷰헬스케어

주소 : 경기도 화성시 마도면 마도로 384-10

전화 : 031)312-3791(대)

팩스 : 031)312-3287



Rev.3 2013. 05

to your health
Clearview Healthcare



취급설명서

고령자용 조절형 지팡이 ()



목차

사용상의 주의-----	2P	길이조절방법-----	5P
기능 및 특징-----	2P	사용방법-----	6P
제품사양-----	3P	사용 후 보관방법---	7P
각부의 명칭-----	4P	제품보증서-----	8P

고령자용 조절형 지팡이를 구입해 주셔서 감사 드립니다.
이 사용설명서를 읽어보신 후 올바르게 사용하시기 바랍니다.
특히 『사용상의 주의사항』(2P)은 사용 전에 반드시 읽어보시고
안전하게 사용하여 주십시오.

사용 전 주의사항

- 1) 사용 전 각 부분을 점검 후 사용 하십시오.
- 2) 눈이 있는곳, 동결된 곳, 진흙이 있는곳 등 미끄러지기 쉬운 속에서는 사용하지 마십시오,
- 3) 지팡이 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 4) 전체 체중을 실지말고 보조용으로 사용하십시오.
- 5) 지팡이를 개조해서 사용하지 마십시오,
- 6) 조립식 지팡이의 경우 조립상태를 확인한 뒤 사용하십시오.
- 7) 평지에서는 지팡이 고무캡이 지면에 접지 되어 있는지 확인 후 사용 하십시오.
- 8) 환기구 등 노면에 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 9) 접이식 지팡이를 개봉시 또는 접은상태에서 펼칠때 주위사람이 다치지 않도록 주의하시기 바랍니다.

* 다음과 같은 경우에는 사용하는데 적합하지 않은 경우 입니다.

- 1) 지팡이 없이 보행 할 수없는 분은 사용이 적합치 않습니다.
- 2) 체중을 너무 가하면 오히려 어깨 손 등을 다칠 경우도 있으므로 자립이 어려운 분께는 적합하지 않습니다.

* 다음과 같은 경우에는 사용을 정지 해 주세요

- 1) 구입 후 자립은 가능하나 혼자 보행 할 수없는 경우
- 2) 반신 불수 환자와 같은 도움이의 도움없이 보행이 어려운 경우

사용 상 주의사항

1. 사람을 향해 휘두르지 마십시오.
2. 사용전에 각 부분을 점검한 후 사용하십시오.
3. 지팡이 끝 고무가 부서지거나 마모되는 등의 이상이 있을 때에는 교환하십시오.
(가) 지대가 확실히 고정된 것을 확인하고 사용하십시오. (단, 일자형 지팡이는 제외한다.)
(나) 접이식 지팡이에 있어서는 고무 로프의 열화, 느슨함, 손상 등의 이상이 있을 때는 판매점 등에 연락하시기 바랍니다.
(다) 조립식지팡이에 있어서는 사용중 헐거움 등의 이상이 없는지 수시로 확인하십시오.
(라) 미끄러지기 쉬운 노면 등에서의 사용은 충분히 주의하십시오.
4. 용도 이외(예를 들어 등산용, 호신용 등)에는 사용하지 마십시오.
5. 강한 물리적 압력 등이 가해지지 않도록 하십시오.

기능 및 특징

1. 지팡이 본체에 야광기능을 추가함으로 고령자에게 어두운 곳에서 사용 시 편리함과 아름다움을 제공 합니다.
2. 지팡이 손잡이를 엘레스토머 재질로 사용하여 사용자에게 부드럽운 밀착감으로 사용감을 높이는 특징이 있습니다.

제품 사양



모델명	급여코드	높이	중량	고무캡 직경	재 질
RPM75120P(일자형)	M03030027601	75~98cm(10단)	375g	39 ∅	본체:알루미늄(야광), 타입:합성고무 손잡이 : 엘레스토머 (소프트그립)
RPM75137P(일자형)	M03030027602	85~95cm(5단)	260g	35 ∅	
RPM76206(접이식)	M03030027603	75~83cm(4단)	290g	35 ∅	

안전동작하중 : 100kg내


RPM75120P RPM75137P RPM76206



모델명	높 이	중 량	고무캡 직경	재 질
RPM75129P(일자형)	75~97cm(10단)	380g	39 ∅	본체:알루미늄(야광), 타입:합성고무 손잡이 : 엘레스토머 (소프트그립)
RPM75132P(일자형)	75~97cm(10단)	380g	39 ∅	
RPM73070(다족형)	89~104cm(7단)	1000g	29 ∅	
RPM70005P(다족형)	75~98cm(10단)	925g	25 ∅	
RPM76207(접이식)	75~98cm(10단)	375g	39 ∅	
RPM76208(접이식)	75~97cm(10단)	380g	39 ∅	
RPM76209(접이식)	75~97cm(10단)	380g	39 ∅	


안전동작하중 : 100kg내

RPM75129P RPM75132P RPM73070 RPM70005P RPM76207 RPM76208 RPM76209

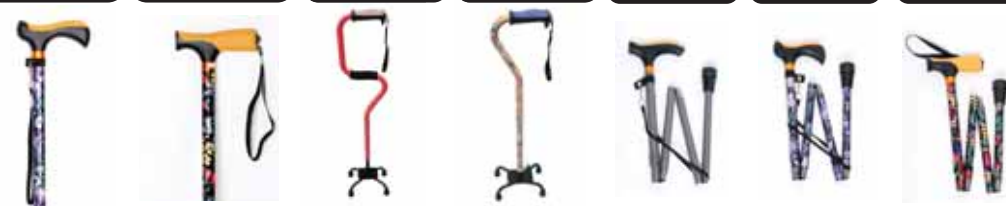

각부의 명칭



일자형/접이식

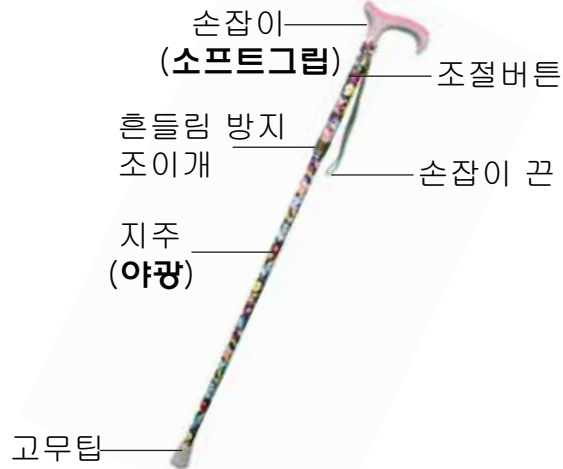

다족형 지팡이 해당모델 : RPM73070



다족형 지팡이 해당모델 : RPM73070

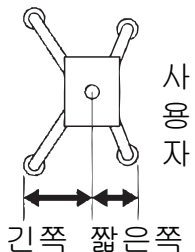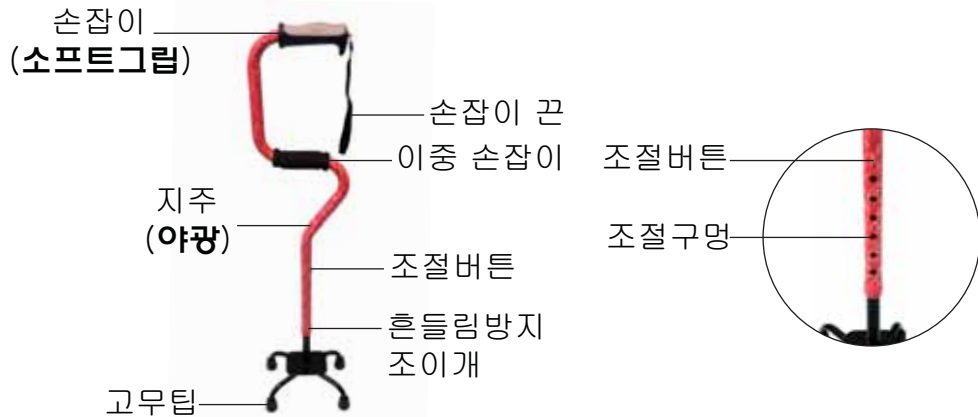

통상은 그림과 같이 지팡이의 다리로부터 중심까지 짧은 쪽이 사용자 몸쪽으로 오게 합니다.

길이조정방법



1. 본체상부를 잡고, 흔들림방지 조이개를 풀니다.
2. 조절버튼을 누르면서 본체하부로 조절을 합니다.
3. 조절버튼이 '딱' 하는 소리가 나면, 조이개를 다시 조입니다.

해당모델 : RPM75120P, RPM75137P, RPM75129P, RPM75132P, RPM76206, RPM76207, RPM76208, RPM76209

접이식 지팡이 접는방법



1. 결합부의 양쪽을 확실히 잡습니다.
2. 양쪽으로 잡아당겨 꺾습니다.




주의

손이 끼지 않도록 주의하시기 바랍니다.
접이식 지팡이를 개봉시 또는 접은상태에서 펼칠때 주위사람이 다치지 않도록 주의하시기 바랍니다.

해당모델 : RPM76206, RPM76207, RPM76208, RPM76209

다족형 지팡이 높이 조절방법 및 2중 손잡이 사용법

높이조절

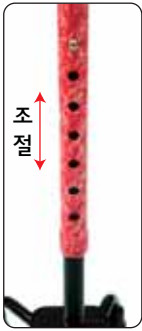

흔들림 방지 조이개를 개방 후 높이 조절 버튼을 눌러 알맞은 높이에 조정된 후 조절구멍에 조절버튼을 ‘딸각’ 소리가 나도록 맞추어 넣습니다.

해당모델 : RPM73070, RPM70005P

2중 손잡이 사용법




앉았다가 일어설 때, 왼손과 오른손으로 각 손잡이를 나누어 잡고 지탱하여 일어설 때 힘을 덜 들이고 편하게 일어설 수 있습니다.


해당모델 : RPM73070

사용자의 따라 다족형 지팡이의 손잡이 방향 조정방법

- ① 흔들림 방지 조이개를 풉니다. (RPM70005P 모델은 나사를 풉니다.)
- ② 조절버튼을 눌러 본체를 180도 회전시킵니다.
- ③ 흔들림 방지 조이개를 조입니다. (RPM70005P 모델은 나사를 조입니다.)

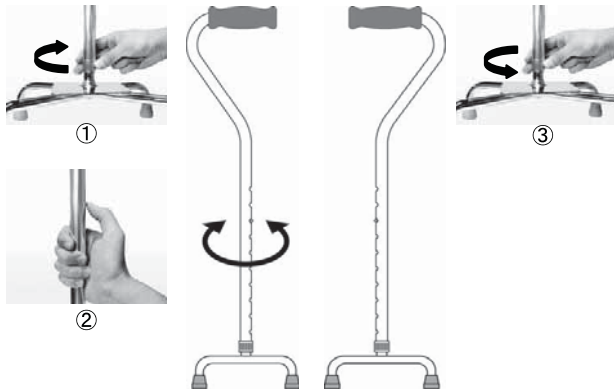


⚠ 주의

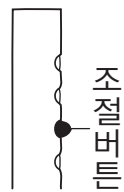

방향조정 후 조절버튼이 완전히 밖으로 나와 고정되어진 상태를 확인 후 사용하십시오.

⚠ 경고

그림과 같이 다족형 지팡이의 계단 이용 시 4발 모두 완전하게 계단면을 짚고 사용하십시오.

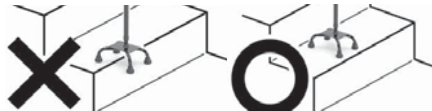

사용 후 및 보관방법

1. 사용 후 지팡이에 묻은 흙, 먼지, 물기 등을 잘 닦아내고 통풍이 잘되는 그늘진 곳에 세워서 보관하십시오.
2. 손잡이가 헐겁거나 지팡이 고무가 닳았을 경우에는 판매점이나 당사 고객센터로 연락하시기 바랍니다.
3. 휘발성 용제(신나, 벤젠)등을 사용하지 마십시오.
4. 접이식지팡이에 있어서는 고온의 장소(예를 들어 스토브앞 여름 때의 자동차 내의 방치 등)는 고무 로프가 열화되기 쉽게 되기 때문에 피하십시오.
6. 저온의 장소(예를 들어 한랭지 등)에 서는 접은 상태에서 바로 고무로프의 탄성이 회복되지 않는 것이 있기 때문에 주의하십시오.

⚠ 주의 조절버튼이 ‘딱’하는 소리가 난 후, 확실히 고정이 되어 있는가 반드시 확인하시기 바랍니다.(고장 및 넘어질 위험이 있습니다.)

간단한 이상, 고장 구별 및 처리방법

1. 지팡이를 짚을 시 소리가 날 경우 → 흔들림 방지 조이개가 꼭 조여져 있는지 확인합니다.
2. 길이 조절 시 뻑뻑한 느낌이 들 경우 → 흔들림 방지 조이개가 풀려 있는지 확인합니다.
3. 지팡이를 짚을 시 미끄러지고 불안정한 경우 → 즉시 고무팁을 교환합니다.

바른 지팡이 선별법

지팡이 손잡이에 잡을 위치를 정확히 정해서 지팡이 끝과 발 끝을 20cm두고 팔꿈치는 30~40도 굽어진 정도가 좋습니다. 이 상태에서 지팡이 길이를 정하는 것이 좋습니다.

