

품질 보증서

- 제품명 : 목욕의자
- 모델명 : SC-1000
- 제조일자 : 20 년 월 일
- 구입일자 : 20 년 월 일
- 고객성명 :
- 구입처 :
- 전화번호 :

본사의 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다.

■ 아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품의 이상 발생 시 보증기간(구입 후 1년)동안 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 A/S센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
3. 다음의 경우에는 무상 A/S에서 제외됩니다.
 - * 사용자의 취급부주의로 인한 고장
 - * 천재지변(화재, 염해, 수해, 기타)으로 인한 고장
 - * 임의로 개조, 변경하여 발생하는 고장
 - * 가정요양용 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상
 - * 소프트 패드 또는 고무캡 등 소모품

■ 제품문의 및 A/S 신청

1. 소비자 상담실 : 031-312-3791/3
2. 상담시간 : 평일 오전 9시~오후5시(토요일 휴무)

■ 수리, 취급 등의 상담은 먼저 구입하신 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.



to your health

Clearview Healthcare Products, Inc.

(주)클리어뷰헬스케어

경기도 화성시 마도면 금당리 191-4

전화:031)312-3791(대) 팩스:031)312-3287

E-mail : clearview@bedsorefree.com

website: www.bedsorefree.com



to your health

Clearview Healthcare

취급설명서

목욕의자 SC-1000



목 차

각 부의 명칭-----2P	손질 방법, 기능 및 특징 --5P
제품사양, 사용방법 -----3P	사용방법-----6P
안전상의 주의-----4P	보증 및 사후관리-----7P

목욕의자를 구입해 주셔서 감사 드립니다.

이 사용설명서를 읽어보신 후 올바르게 사용하시기 바랍니다.

특히 『안전을 위한 주의사항』(4P)은 사용 전에 반드시 읽어보시고 안전하게 사용하여 주십시오.

각부의 명칭



세부 사진



제품 사양

품명/표준명	목욕의자/KSPA 2003
모델명	SC-1000
색 상	블루
제품사이즈	52 X 50 X 63cm
중 량	5.3kg
허용하중	95kg 이하
재 질	목욕의자본체 : 알루미늄
	등받이, 좌면 : 폴리에틸렌
	등받이쿠션, 좌면쿠션 : EVA
	팔걸이 : EVA, 고무캡 : 합성고무

사용 방법

- ◆ 사용시 몸 상태에 맞춰 편한 높이로 조정하여 주십시오.
- ◆ 사용시 바닥이 평평하고 안정된 장소에서 사용하여 주십시오.

⚠ 주의 사용전에 각부위의 볼트 등이 느슨하지 않고 고정 되어있는 것을 확인 후 사용하여 주십시오. 넘어져 다칠 위험이 있습니다.

⚠ 주의 다리는 4개를 같은 높이로 하여 주십시오. 본체가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.

안전상의 주의

⚠ 경고 : 목욕의자 외 사용금지

잘못된 방법으로 사용하면 중대한 사고로 이어질 우려가 있어 아래의 항목을 반드시 지켜 주십시오.

- 1) 사용자가 자신의 신체를 혼자 가눌 수 없는 경우는 반드시 간호하시는 분이 시중을 들어 주십시오.
- 2) 반드시 욕실내의 평평하고 안정된 장소에 놓고 사용해 주십시오.
- 3) 목욕의자에는 2명 이상이 동시에 앉지 마십시오.
(넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 4) 체중 95kg이 초과되는 분은 사용하지 마십시오.
(본체가 파손되어 다칠 수 있습니다.)
- 5) 욕실 내 목욕의자 이외의 다른 용도로는 사용하지 마십시오.
- 6) 등받이를 지탱해서 일어서지 마십시오.
(넘어져서 부상을 당하는 원인이 됩니다.)
- 7) 팔걸이를 손잡이 대신에 잡거나 가로방향으로 힘을 가하지 마십시오.
- 8) 좌면위에 서거나 다리를 걸치거나 하지 마십시오.
(넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 9) 상체를 뒤로 젖혀 등받이에 체중이 너무 실리지 않도록 하십시오.
- 10) 팔걸이에 체중이 너무 많이 실리지 않도록 하십시오.
- 11) 높이 조정 시 다리 파이프의 누름핀을 확실하게 고정시켜 주십시오.
- 12) 고무캡이 확실하게 달려 있는지 확인 하십시오.(미끄러져 다칠 위험이 있음)

손질 방법

- ◆ 등받이 쿠션, 좌면 쿠션은 분리하여 세척합니다.
- ◆ 다시 끼울 때는 쿠션의 튀어나온 부분을 각각 좌면, 등받이 구멍에 넣고 눌러주십시오.
- ◆ 사용전, 후 바닥, 목욕의자에 묻은 비누등은 꼭 씻어 주십시오.
- ◆ 다리 한 쪽에 있는 고정홀더로 제품을 고정시켜 안전하게 접어서 보관할 수 있습니다.

⚠ 주의 뜨거운 물을 끼얹지 마십시오.
시트의 변형이나 파손의 원인이 됩니다.

⚠ 주의 쿠션이 확실히 고정되어 있는지 확인하여 주십시오.
몸이 미끄러져 다칠 위험이 있습니다.

⚠ 주의 염소계 세제 또는 연마제, 시너 등은 사용하지 마십시오.
플라스틱이 약해지거나 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

기능 및 특징

1. 가정이나 요양시설의 목욕실이나 화장실 등에서 고령자의 목욕이나 샤워를 보조하기 위한 제품입니다.
2. 접이식 타입으로 좁은 공간에서 보관이 용이합니다.
3. 신장에 따라 4단층(약7cm)으로 조절이 가능합니다.
4. 팔걸이가 부착되어 사용자에게 안정감과 편리함을 제공합니다.
5. 등받이와 좌면에 부드러운 EVA 재질을 사용하여 부드러움과 편안함을 제공합니다.
6. 가벼운 알루미늄 재질로 사용하기 편리합니다.



1. 좌면 높이 조정 방법

버튼을 누르고 구멍의 위치를 바꿈으로서 위치 조절 가능
 버튼이 가려져 안보일 경우 다시 분리하여 구멍 확인 후 다시 설치하여 주십시오.
 항상 4개 다리는 같은 높이가 되도록 하여 주십시오.



2. 목욕의자를 펴는 방법

- ▶ 등받이를 잡고 좌면을 앞으로 내려 주십시오.
- ▶ 좌면이 수평이 될 때까지 눌러 주십시오.
- ▶ 좌면이 끝까지 눌러져 고정 된것을 확인 후 사용하십시오.



3. 목욕의자를 접는 방법

- ▶ 등받이를 잡고 좌면을 위로 올려 주십시오.
- ▶ 좌면 끝이 등받이에 닿을 때까지 올려 주십시오.

보증 및 사후관리

◆ 보증서에 관해서

보증서는 사용설명서에 첨부되어 있으며 보증내용 등을 잘 읽으신 후 소중하게 보관하여 주십시오. 보증기간은 구입 후 1년입니다.
 일반 가정용 이외로 사용된 경우는 보증기간 내라도 유상 수리에 해당 됩니다.

◆ 수리를 의뢰 하실 때

보증기간 중에는 구입처에 품명, 품번, 구입일, 고장상황, 이름, 주소, 전화번호를 알려 주십시오.

보증기간이 지난 경우에는 구입처와 상담하여 주십시오.



단체표준명(품명) : 목욕의자

단체표준번호 : KSPA2003

인증번호 : 제 167호(20110906-2)

모델명 : SC-1000

제조년월일

제조원 : (주)클리어뷰헬스케어

제조국 : 대한민국

품질보증

본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함
 (사)한국고령친화용품산업협회