

사용 후 보관 및 관리방법

- 회전, 구동, 착탈 부위에 이물질이 끼면 작동이 원활하지 않으니 수시로 제거해 주십시오.
- 제품 관리 시 신나, 벤젠, 강한 세척제(휴발성 물질)로 사용하지 마시고 부드러운 천을 이용하십시오.(변색, 변형의 원인이 될 수 있음)
- 직사광선이나 고온다습한 곳을 피하여 보관하십시오.(변색, 변형 우려)
- 수시로 바퀴, 브레이크등을 보수, 점검하며 필요에 따라 교환하여 주십시오.
- 제품의 고장 시 임의로 수리하지 마시고, 판매점 또는 수입원에 의뢰한 후 수리 및 교정 검사 후 사용하십시오.

품질 보증서

- 제품명 : 고령자용 보행보조차
- 모델명 : SV-2000
- 구입일자 : 20 년 월 일
- 고객성명 :
- 구입처 :
- 전화번호 :

- 아래와 같이 보증합니다.

보증기간은 제품 구입 후 1년이며 차체 결함시 무상으로 A/S를 받으실 수 있습니다.

* 단, 아래 사항은 무상 A/S에서 제외됩니다.

- 각부분의 노화로 인한 고장, 파손시 (바퀴, 손잡이 등 소모품)
- 제품의 오용, 자연재해, 임의로 개조, 변경하여 발생하는 고장.

* 제품 문의 및 A/S 신청

- 소비자 상담실 : 031) 312-3791/3
- 상담시간 : 평일 오전 9시 ~ 오후 5시(토요일 휴무)

 to your health
Clearview Healthcare Products, Inc.

제조국 : 중국
 제조원 : Aikin Healthcare Co., Ltd
 수입원 : (주)클리어뷰헬스케어
 주 소 : 경기도 화성시 마도면 금당리 191-4
 전 화 : 031)312-3791(대) 팩스 : 031)312-3287
 E-mail : clearview@bedsorefree.com
 website: www.bedsorefree.com

 to your health
Clearview Healthcare

취급설명서

고령자용 보행보조차 SV-2000



목 차

안전상의 주의-----	2P	보행차 펴는 방법-----	6P
사용 상 주의 사항-----	3P	브레이크 사용법-----	7P
각 부의 명칭과 제품사양----	4P, 5P	제품보증서-----	8P

고령자용 보행보조차 SV-2000을 구입해 주셔서 감사 드립니다.

이 사용설명서를 읽어보신 후 올바르게 사용하시기 바랍니다.

특히 『안전을 위한 주의사항』 (P2)은 사용 전에 반드시 읽어보시고 안전하게 사용하여 주십시오.

제품 사양

품 명	SV-2000 (분리식)
색 상	검 정, 알루미늄
규 격	W430 × L580 × H830mm
재 질	철, 스테인레스, 알루미늄, 합성수지
제품중량	5.1kg
수납 바구니	W400 × L250 × H130mm
수납바구니 적재무게	5kg
허용하중	80kg
적정신장	150~180cm

기능 및 용도

- ◆ 정상적인 보행에 지장이 있는 노약자의 보행을 돕기 위한 제품으로 실내 및 실외에서 사용 가능한 제품입니다.
- 1. 좌석 시트가 부착된 보행보조차로서 실내 및 실외에서 사용이 가능합니다.
- 2. 손잡이에 브레이크가 부착 되어 있어서 보행 및 주차시 안전하고 손쉽게 사용이 가능합니다.
- 3. 8인치 큰바퀴 사용으로 안전하며 방향조절버튼으로 조절하여 방향전환이 자유롭습니다.
- 4. 한번의 조작으로 손쉽게 접을 수 있어서 고령자외 모든 분들이 보관 및 운반이 용이합니다.

각부의 명칭



세부 사진



손잡이




수납바구니



높낮이조절 버튼



뒷수납바구니

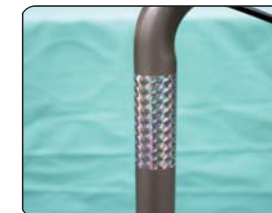

야광스티커



방향조절버튼

안전상의 주의

경고

잘못된 방법으로 사용하면 중대한 사고로 이어질 우려가 있어 아래의 항목을 반드시 지켜 주십시오.

- 1) 좌면위에 서거나 다리를 걸치거나 뛰어 올라가지 마십시오.
(넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 2) 보행 보조차에 두명 이상 동시에 앉지 마십시오.
(넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 3) 높이 조정 시에는 조정 파이프의 고정 레버를 확실하게 고정시켜 주십시오.
(손잡이가 흔들려 다칠 위험이 있습니다.)
- 4) 바닥면에 계단 등 단차가 있거나 경사가 심한 곳, 미끄러운 곳에서는 사용하지 마십시오.
(불안정한 장소에서 사용하면 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 5) 흔들지 마십시오.
(본체가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 6) 체중 80kg이 초과되는 분은 사용하지 마십시오.
(본체가 파손되어 다칠 수 있습니다.)
- 7) 반드시 평평하고 안정된 장소에 놓고 사용해 주십시오.
- 8) 보행 보조차 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.
- 9) 등받이를 지탱해서 일어서지 마십시오.
(넘어져서 부상을 당하는 원인이 됩니다.)
- 10) 어린이가 혼자서 사용하지 않도록 하십시오.
- 11) 사용전에 각 부분 사전 점검을 한 후에 정상 작동이 되는지 확인 후 사용하십시오.
- 12) 제품을 던지거나 떨어뜨리는 등 강한 충격을 가하지 마십시오.

- ◆ 본 제품을 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 사용설명서를 반드시 읽고 미리 숙지 하신 후 제품을 사용하여 주시기 바라며 사고방지를 위해서 사용법을 꼭 지켜주십시오.

사용 상 주의 사항

- ◆ 본 제품은 고령자, 환자 또는 장애인 등 정상적인 보행에 지장이 있으신 분들의 보행을 돕기 위한 보행 보조제품입니다.
이 제품 사용시 사용자분 스스로가 외출하실 때 보행차 손잡이에 기대어 차체만이 앞으로 움직이지 않도록 유의 하시고 제품 본래 목적 이외의 용도로 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
(바닥면에 계단 등 단차가 있거나 경사가 심한 곳, 미끄러운 곳에서는 사용하지 마십시오.)
1. 사용 전 사용자의 체형에 맞게 손잡이와 높낮이를 필히 조정 하십시오.
 2. 브레이크 사용시 좌우 양바퀴가 동시에 걸리는지 확인 후 시용하십시오.
 3. 제품에 기대어 차체만이 앞으로 움직이지 않게 주의하십시오.
 4. 이 제품은 주로 고령자가 외출할 때 보행이나 운반 및 휴식에 이용하는 제품으로 자립보행 할 수없는 사람(예 손잡이 등을 붙잡지 않으면 보행 할 수 없는 사람)의 사용에는 적합하지 않으니 주의 하십시오.
 5. 가방안에 유아나, 좌석위에 사람을 실은채 이동하지 마십시오.
 6. 조립 및 조절은 확실히 하고 확인 후 사용하십시오.
 7. 타이어나 브레이크의 마찰이 없는지를 보 수 점검하고 필요 시 교환 하여 사용하십시오.
 8. 사람이 붐비는 장소나 교통이 혼잡한 곳에서 사용 시 주의 하십시오.
 9. 앉은 상태에서 운동을 하지 마십시오
 10. 의자에 앉기 전에 항상 안전을 위해 브레이크 장치를 걸어 두어야 합니다.
 11. 임의로 제품의 분해 및 강한 충격을 가하지 마십시오.

보조차 펴는 방법



1. 좌석과 손잡이를 양손으로 잡는다.
2. 양손을 동시에 끝까지 들어 올린다.

보조차 접는 방법



1. 등받이 뒤쪽에 있는 고정레버를 뒤로 당긴 후 좌석과 손잡이를 잡고 안으로 접습니다.

브레이크 사용법



1. 보행시 손잡이 브레이크를 위쪽으로 당긴다.(브레이크 풀림)
2. 주차시 브레이크 바깥쪽에 있는 주황색 브레이크 고정레버를 위로 올려 고정시킨다.
브레이크 해제 시 손잡이 브레이크를 위로 올리면 해제됩니다.

손잡이 높낮이 조절 방법

조절범위 : 830~930cm



1. 보조차의 사용자가 보조차와 서서 본인의 높낮이 위치를 확인합니다.
2. 좌,우 높낮이 조절 버튼을 좌측으로 돌려 버튼을 개방한 후 높낮이 확인 후 조절버튼을 우측으로 돌려 잠근 후 고정시킵니다.

⚠ 주의

1. 브레이크는 제품을 주차하거나, 보관할때와 시트에 앉을때 사용하십시오.
2. 브레이크 잠금 상태에서 제품을 밀면 브레이크 고장의 원인이 됩니다.

앞바퀴 방향조절 방법

사진참조

* 방향 전환은 천천히 여유롭게 하십시오.

그림 1.



◆ 직진 방향으로만 주행 시

그림 3.



◆ 360 회전

앞바퀴의 360 회전가능하며 방향의 전환이 용이.
방향조절버튼을 두번 아래로 내린다.

그림 2.



앞바퀴의 주행각도
좌우 45°각도 이내
사용 시

◆ 앞바퀴 좌우 45°내에서만 움직이도록 고정
방향고정 장치 1개가 위로 올라가 있음.
버튼을 한번 아래로 내린다.

※ 참고

1. 방향조절버튼의 위치 확인 후 사용하십시오.
2. 주행상황에 따라 앞바퀴의 방향조절버튼을 조절하여 사용하십시오.