

품질 보증서

- 제품명 : 미끄럼 방지매트
- 모델명 : NSM-001
- 제조일자 : 20 년 월 일
- 구입일자 : 20 년 월 일
- 고객성명 :
- 구입처 :
- 전화번호 :

본사의 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다.

■ 아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품의 이상 발생 시 보증기간(구입 후 1년)동안 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 A/S센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
3. 다음의 경우에는 무상 A/S에서 제외됩니다.
 - * 사용자의 취급부주의로 인한 고장
 - * 천재지변(화재, 염해, 수해, 기타)으로 인한 고장
 - * 임의로 개조, 변경하여 발생하는 고장
 - * 가정요양용 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상
 - * 소프트 패드 또는 고무캡 등 소모품

■ 제품문의 및 A/S 신청

1. 소비자 상담실 : 031-312-3791/3
2. 상담시간 : 평일 오전 9시~오후5시(토요일 휴무)

■ 수리, 취급 등의 상담은 먼저 구입하신 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.

 to your health
Clearview Healthcare Products, Inc.
(주)클리어뷰헬스케어
경기도 화성시 마도면 금당리 191-4
전화:031)312-3791(대) 팩스:031)312-3287
E-mail : clearview@bedsorefree.com
website: www.bedsorefree.com

 to your health
Clearview Healthcare

취급설명서

미끄럼 방지매트 NSM - 001



엠보싱 타입의 특유의 돌기는 뛰어난 미끄럼 방지 기능과 지압효과가 있으며, 욕실, 화장실, 거실, 주방, 미끄러워지기 쉬운 장소에서 안전하게 사용이 가능합니다. 또한 연결고리 구조로 되어 있어서 연결하여 더욱 넓은 공간에서의 사용이 가능합니다.

목 차

안전상의 주의사항-----	2P	사용방법-----	3P
손질방법-----	2P	보증 및 사후관리-----	3P
제품사양-----	2P	품질보증서-----	4P

클리어뷰 헬스케어 미끄럼방지 매트 NSM-001을 구입하여 주셔서 감사를 드립니다. 이 사용설명서를 읽어보신 후 올바르게 사용하기 바랍니다. 특히 『안전을 위한 주의사항』은 사용전 반드시 읽어보시고 사용하여 주십시오.

안전상의 주의

⚠ 경고

잘못된 방법으로 사용하면 중대한 사고로 이어질 우려가 있어 아래의 항목을 반드시 지켜 주십시오.

- 1) 사용자의 신체 및 연령 상황에 따라 수발자의 도움을 받아 사용하셔야 합니다.
- 2) 사용자의 미끄럼 방지를 위해서 바닥이 고정된 평평한 곳에서 사용하여야 합니다.
- 3) 제품사용 전 부착면을 깨끗이 청소하여 이물질이 없도록 해야 합니다.
- 4) 사용 전 바닥 면에 물기를 제거 한후 사용하여 주십시오.
- 5) 장기간 직사광선에 노출 시킬 경우 변색이 우려가 있습니다.

손질 방법

- 1) 사용 후 정기적으로 중성세제를 이용하여 세척하고 건조시켜 주십시오.
- 2) 제품에 이상이 있거나 파손된 경우 당사의 A/S센터에 연락하여 주시기 바랍니다.

제품 사양

품 명/표준명	미끄럼방지매트/KSPA1018
모 델 명	NSM-001
색 상	파랑
사 이 즈	길이550mm x 폭 450mm x 두께 10mm
재 질	EPDM(ethylene propylene rubber)
무 게	1.2 kg

사용 방법

- 1) 욕조바닥, 욕실바닥, 거실, 주방, 화장실 등 미끄러지기 쉬운 장소에 깔아서 사용합니다.
- 2) 연결고리 구조로 두장 이상을 연결하여 사용이 가능합니다. 보다 넓은 폭을 원하실 경우 연결하여 사용하여 주십시오



보증 및 사후관리

◆ 보증서에 관해서


보증서는 사용설명서에 첨부되어 있으며 보증내용 등을 잘 읽으신 후 소중하게 보관하여 주십시오. 보증기간은 구입 후 1년입니다.

일반 가정용 이외로 사용된 경우는 보증기간 내라도 유상 수리에 해당 됩니다.

◆ 수리를 의뢰 하실 때

보증기간 중에는 구입처에 품명, 품번, 구입일, 고장상황, 이름, 주소, 전화번호를 알려 주십시오.

보증기간이 지난 경우에는 구입처와 상담하여 주십시오.

	단체표준명(품명) : 미끄럼 방지매트 단체표준번호 : KSPA1018 인증번호 : 모델명 : NSM-001 제조년월일 : 제조원 : (주)클리어뷰헬스케어 제조국 : 대한민국
	<p style="text-align: center;">품질보증</p> 본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함 (사)한국고령친화용품산업협회